


# CHILI Diagnost

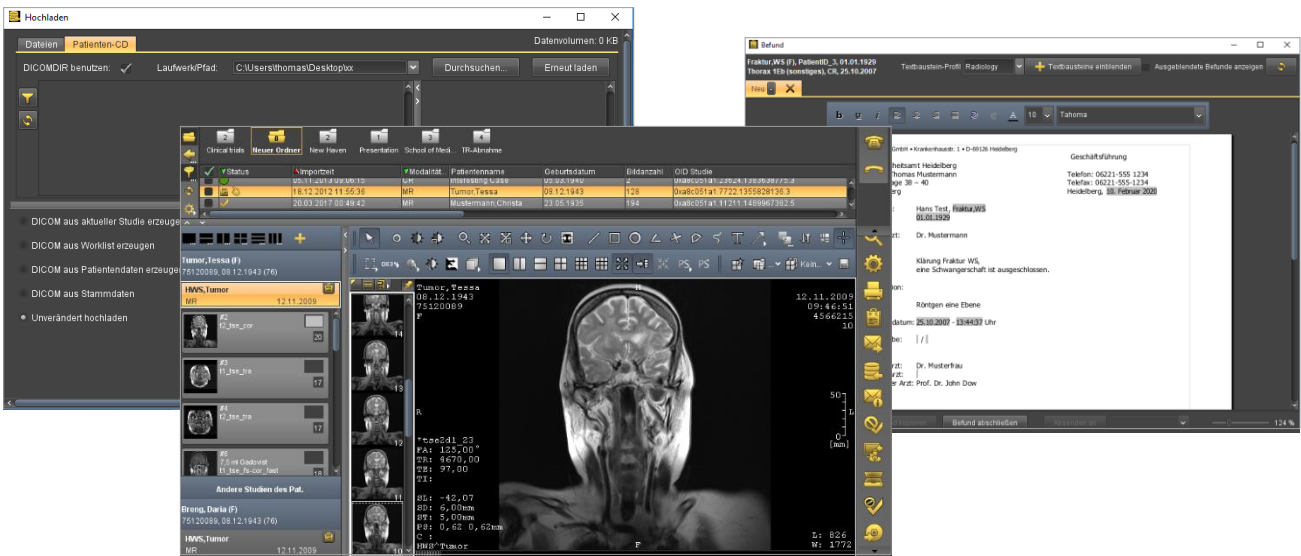






Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das ausführliche Benutzerhandbuch mit wichtigen Informationen zur Sicherheit.





## Studien aus Datenbank wählen


### Funktionen des Datenbankmenüs

-  Ordner anzeigen
-  Studienhistorie anzeigen
-  Filter wählen und konfigurieren
-  Datenbank aktualisieren
-  Datenbank auslagern oder wechseln

### In der Datenbank suchen

- Doppelklick in Spaltentitel, Begriff eingeben und mit Eingabetaste (Enter) bestätigen  

### Weitere Spalten in der Datenbank anzeigen

- Rechtsklick in Kopfzeile 

### Datenbank ausblenden und Anzeige maximieren

- Eingabetaste drücken 

## Bildbereiche anordnen

### Serien-/Voraufnahmen





Voreinstellungen für die Anordnung der Bildbereiche im Arbeitsbereich (1, 2, 3 oder 4 Bildbereiche)











-  Neuer Bildbereich
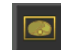
## Arbeitsbereich wechseln

### Telekonferenz

-  Telekonferenz annehmen
-  Anrufen oder Auflegen

### Arbeitsbereich





-  Bilder
-  Daten
-  Einstellungen
-  Drucker
-  Befund
-  Versand
-  Import/Hochladen
-  CD Export
-  Handbuch
-  Info-Dialog

### Beenden











## Bilder darstellen und bearbeiten

















### Lichtkasten

-  Nur markierte anzeigen
-  Localizer/Topogramm
-  Kompression
-  Lichtkasten feststellen



### Im Lichtkasten navigieren

-  In Spalte nach oben/unten Blättern
-  Aktiven Lichtkasten maximieren (Vollbild)
-  Bildweise vorwärts und rückwärts blättern
-  Seitenweise blättern
-  Bild markieren
-  Markierung aufheben
-  Zum ersten Bild springen
-  Zum letzten Bild springen






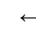
### Bilddarstellung

-  Markierung
-  Sortieren nach
-  Overlays anzeigen
-  Zoomfaktor auswählen
-  Level/Window auswählen
-  Level/Window zurücksetzen
-  Invertieren
-  Anzeigemodus
-  Bildteilung pro Bildbereich (1, 2, 4, 6 oder 9 Bilder)
-  An Fenstergröße anpassen
-  Aktionen auf alle Bilder anwenden
-  Alles zurücksetzen
-  Hanging automatisch anwenden
-  Profil auswählen
-  Hanging auswählen
-  Ansicht für Benutzer speichern

























### Tastenkürzel zum Vergrößern und Verschieben

-  Verschieben bei gedrückter linker Maustaste
-  Vergrößern bei gedrückter linker Maustaste oder mit Mausrad



### Tastenkürzel zur Bilddarstellung

-  **Shift + E** Kantenanhebung ein oder aus
-  **Shift + S** Bildschärfe erhöhen ein oder aus
-  **Shift + G** Bild glätten ein oder aus
-  **A** Auto Level/Window aktivieren (automatisches Fenstern eines Bildes)
-  Fenstereinstellung (Level/Window) einstellen bei gedrückter rechter Maustaste
-  **Esc** Laden von Bildern abbrechen




### Bildbearbeitung

-  Zeigen
-  Pixelgrauwerte
-  Level/Window
-  Level/Window im Bereich
-  Lupe
-  Vergrößern/Verkleinern
-  Ausschnitt vergrößern
-  Verschieben (Pan)
-  Freies Drehen
-  Blende (Shutter)
-  Strecke
-  Rechteck
-  Kreis
-  3-Punkt-Winkel
-  4-Punkt-Winkel
-  Polygon
-  Freihand
-  Text
-  Pfeile
-  Bilder mit Drag & Drop verbinden
-  Cine-Loop Bildlauf
-  Bildübergreifende Localizer ein-/ausblenden
-  3D-Cursor
-  **Esc** Einzeichnen von Objekten (ROIs) abbrechen

### Bei aktivierter Lupenfunktion

-  **Shift + Maustaste** Lupenfenster vergrößern oder verkleinern
-  **Strg + Maustaste** Zoomfaktor der Lupe einstellen

### Objekte (ROIs) löschen

-  **Entf** oder **Backspace** Ausgewählte, eingezeichnete ROIs löschen
-  **Shift + Entf** Alle eingezeichneten löschen
-  **Shift + Enter**

### NEXUS / CHILI GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 2  
69221 Dossenheim/Heidelberg, Germany

Tel. +49 6221 18079-10  
E-Mail info@nexus-chili.com  
Internet www.nexus-chili.com

Stand der Kurzanleitung: Februar 2020  
CHILI PACS Version 4.70  
CHILI Diagnost Version 4.46



Die Autoren behalten sich das Recht vor, Änderungen jederzeit ohne Ankündigung vorzunehmen. Alle Rechte, insbesondere Rechte der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, bleiben vorbehalten. Kein Teil der Software bzw. des Benutzerhandbuches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung der Autoren reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.